



骨髄濃縮（BMP）

アフエーシスと細胞採取で患者さんの治療を支える

スペクトラ オプティア


遠心型血液成分分離装置

簡便な骨髓濃縮の操作手順を実現

スペクトラ オプティアは、画面上のガイダンスとシングルバッグを用いることにより、骨髓濃縮 (BMP) 手順の簡便化に寄与します。

手順とシステムのハイライト

最小限のシステム操作	シングルバッグを用いたアプローチで手順を効率化する システムがインターフェイスを継続的にモニターし調整するため、オペレーターによる管理を低減する 操作上で覚えるべき事項を減らして、トレーニングに掛かる労力を軽減する
一貫性のある結果	自動インターフェイス管理システム (AIM) によって、インターフェイスが安定し、一貫した結果が得られる
手順の柔軟性	処理目標値を達成するようにパラメーターをコントロールできる
装置本体の容易な移動	旋回キャスターと大型で耐久性のあるホイールにより、施設内の移動を容易にする

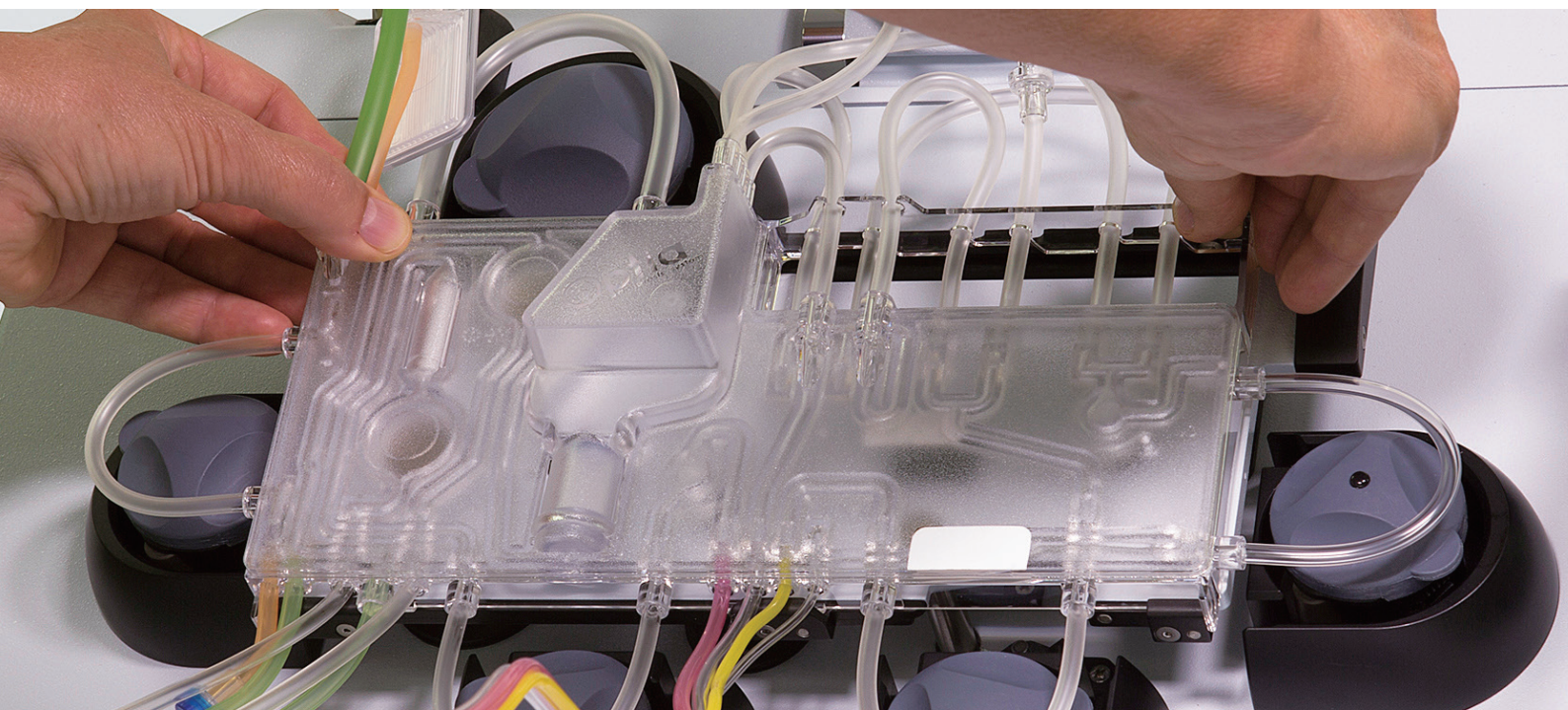


機能

- グラフィカルユーザーインターフェイスが手順の各ステップの操作を示します。
以下に示す通り、手順中に設定を簡単に確認して調整できます。

1. 「BMP バッグ」 接続画面

- システムの指示に従って、1枚のBMPバッグをIDLセットの採血および返血ラインに接続します。

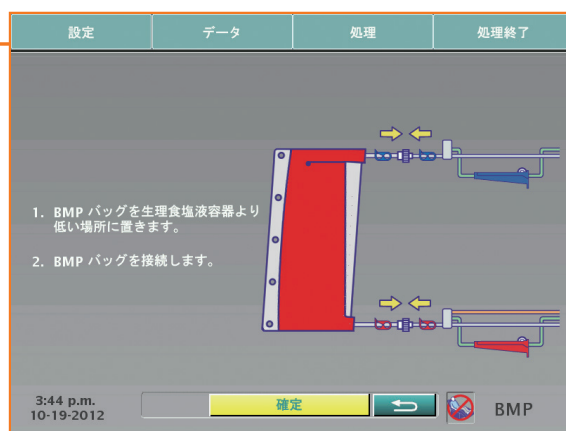


2. 「採取ステータス」 画面

- システムによる血球採取と目標の採取プリファレンスを連続的に比較して表示します。
- 採取プリファレンスを調整できます。
- 採取手順中、採取ポートの画像を表示します。



3. 「処理目標」 画面

- 処理目標が達成されると、音が鳴り、目標値と現在値が表示されます。現在値の周りに黄色枠が表示され、達成された処理目標が一目で分かります。

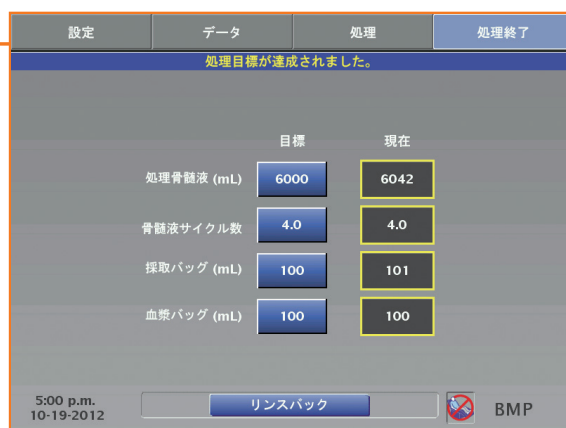


サポート体制


- 本製品では、継続して以下のサポートをご提供してまいります。

- 教育およびトレーニング
- 技術サポート
- 臨床的および科学的サポート
- 保守サービス

BMPセット (アクセサリ) 11300

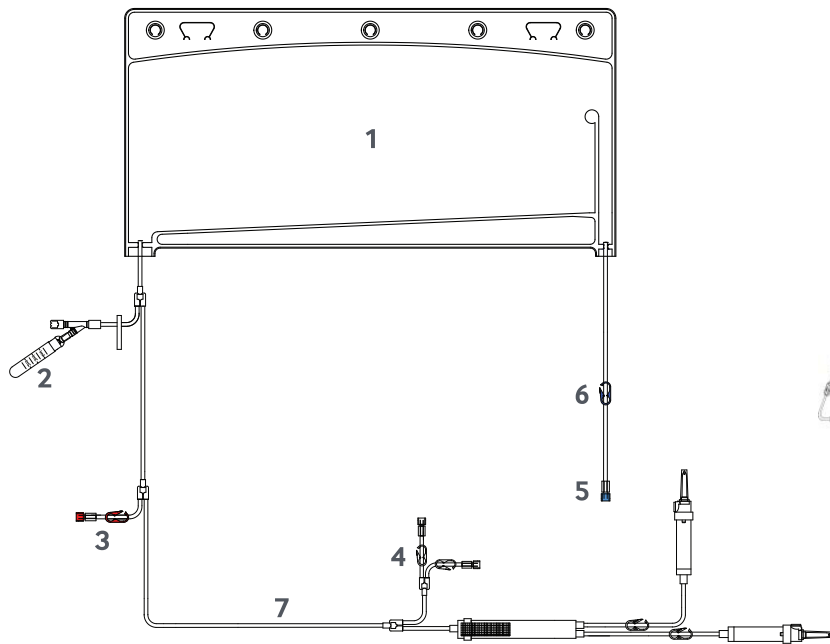

IDLセット 10310

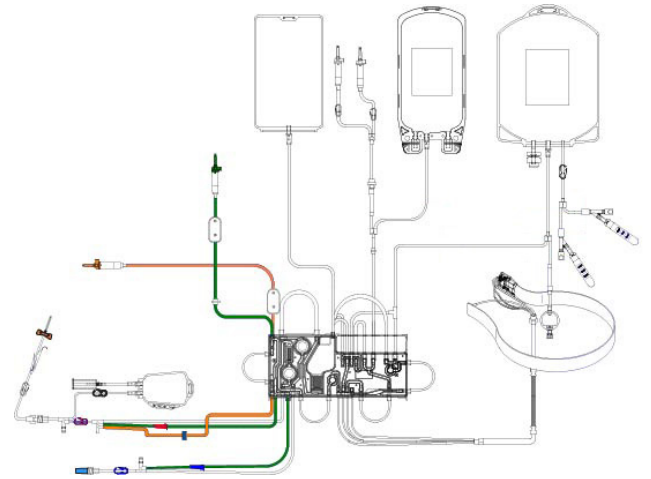

1. BMPバッグ

シングルバッグアプローチで、オペレーターの操作を効率化

2. サンプルバルブ

機能的閉鎖システムを維持しつつ、手順前または手順中にサンプリング可能

3. 採血ラインと赤色の採血クランプ

4. ルアーコネクタアセンブリ

5. 返血ライン

6. 青色の返血クランプ

7. 注入ライン

スパイクにつながるライン上に200ミクロンフィルターがあり、必要に応じて追加濾過可能

コンパクトなパッケージ

色分けされたコンポーネント

保管スペースの縮小

セットアップと操作を簡素化

*BMPセットは必ずIDLセットと組み合わせてご使用ください。

スペクトラ オプティア (本体)

医療機器の分類：高度管理医療機器 (特定保守管理医療機器)

一般的名称：遠心型血液成分分離装置

販売名：スペクトラ オプティア

承認番号：22200BZX00523000

カタログ番号：61000

スペクトラ オプティア用血液回路 BMPセット (アクセサリ) / IDLセット

医療機器の分類：管理医療機器

一般的名称：遠心型血液成分分離装置用血液回路

販売名：スペクトラ オプティア用血液回路

認証番号：22200BZX00554000

カタログ番号：BMPセット：11300 / IDLセット：10310

TERUMO BLOOD AND CELL
TECHNOLOGIES

Terumo Blood and Cell Technologies (テルモ血液・細胞テクノロジー) の製品・ソフトウェアおよびサービスは、お客様が血液や細胞の採取・調製を行うことを可能にし、現在かつ将来にわたって、困難な病気の治療を支援します。私たち130カ国以上のアソシエイトは、血液や細胞治療がさらに多くの患者さんの力になるという可能性を信じ行動していきます。TERUMOBCT.COM

Terumo BCT, Inc.
USA
+1.303.231.4357

Terumo BCT Europe N.V.
Belgium
+32.2.715.0590

Terumo BCT Asia Pte. Ltd.
Singapore
+65.6715.3778

Terumo BCT Latin America S.A.
Argentina
+54.11.5530.5200

テルモBCT 株式会社

163-1450
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
東京オペラシティタワー 49階

電話番号：0120-12-8195 (コールセンター)
Fax番号：03-6743-9800

本製品の詳細は、電子添文および取扱説明書をご参照ください。また、当社ウェブサイトでも製品情報を掲載しています。
<https://www.terumobct.com/location/japan/products-services/Pages/spectraoptia.aspx>